


老人保健施設、特別養護老人ホームや有料老人ホーム  
 サービス付き高齢者向け住宅などにも便利で簡単に使えます。

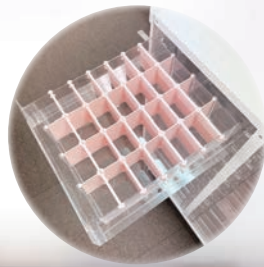

## 一週間分のお薬を保管

仕切り板（オプション）で朝・昼・夕・寝る前の一週間分のお薬を収納することができます。

### 主な機能

- ✓ 専用ソフトを使用したお薬保管と与薬システム
- ✓ バーコードまたは手のひら静脈認証による患者確認
- ✓ 認証結果に応じた患者お薬トレイの自動解錠とオープン
- ✓ 配薬結果の記録および操作履歴確認とデータ出力

### 仕様

#### 30人用 / MEPS21 II - 30

外形： W 1,050 × D 510 × H 1,010 mm  
 （ハンドル、タブレット部等を除く）

重量： 約 68kg

トレイ： 30個（内寸 W 250 × D 68 × H 282 mm）

#### 20人用 / MEPS21 II - 20


外形： W 715 × D 510 × H 1,010 mm  
 （ハンドル、タブレット部等を除く）

重量： 約 60kg

トレイ： 20個（内寸 W 250 × D 68 × H 282 mm）

認証方式： バーコード、生体認証

電源： AC100V 又はバッテリー

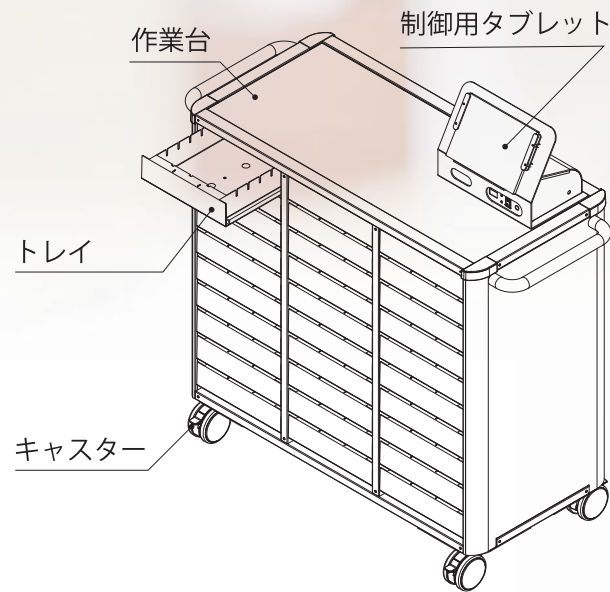

# 静脈認証・バーコード認証でトレイを制御 誤配薬防止カート



手のひら静脈による生体認証・バーコード認証で  
 本人確認することで  
 トレイが開くので誤配薬の心配がありません。  
 認知症疾患対象の方、外国人スタッフにも  
 安心して使用していただけます。



代理店

開発元

**21** TWO ONE 株式会社 **トゥーワン**

〒460-0026 愛知県名古屋市中区伊勢山二丁目5番10号 中基金山ビル 8F

Tel. 052-322-6621 Fax. 052-322-6629

<https://twoone.co.jp/contact>





# 開くのは認証した方のトレイだけ。 患者さんごとのお薬管理システム。



## 誤配薬の防止

手のひら静脈による生体認証やリストバンドバーコードを読み込むと患者さん本人のトレイが自動で開放されます。認証情報と紐付けされたトレイの開閉制御で患者さん本人以外への誤配薬を未然に防止します。




## 記録の出力と活用

PC内に記録された使用履歴はエビデンスとしてお使いいただけます。また服薬状況の記録は患者さん別や日別など様々なソート方法にて出力することができます。



配薬結果画面

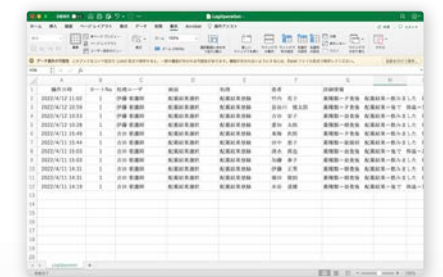

配薬結果を Excel 形式で出力

## 配薬・服薬状況の正確な記録

配薬を行う看護師と患者さんの情報を事前に登録することで配薬履歴を記録することができます。患者さんの服薬状況はその場で入力するので正確に記録されます。



メニュー画面



利用者登録・編集画面



配薬画面



服薬画面



服薬結果・開放画面

## 補充時もしっかり認証

配薬前の補充時は薬包のバーコード・QRコードなどで補充を行う患者さんのトレイのみが開くので補充間違いが起きません。



## バックアップ体制も万全

院内の複数台をサーバーで一括管理。MEPS21専用回線を利用することで配薬・服薬状況などのバックアップを実現。また、薬包にQRコードを印字することでより正確な配薬が可能となります。

